

취급시 주의사항

- 1) 제품에 무리한 압박이나 과도한 충격을 가하지 마십시오. 제품의 허용 최대하중은 150Kg입니다.
- 2) 전동휠체어 및 전동스쿠터를 탑승한 채로 사용하지 마십시오.
- 3) 어린이 및 사용이 어려운 개인이 혼자서 사용하지 않도록 주의 하십시오. 스스로 수동 휠체어 조작이 가능한 사용자만 사용하십시오.
- 4) 조립된 제품을 제조사의 허가 및 동의없이 자의로 분해하지 마십시오.
- 5) 주변 온도가 40도 이상의 고온이나 10도 이하의 저온에서 사용하지 마십시오. 제품 사용 후 보관은 상온의 건조한 곳에 보관하십시오. 가열 및 가습은 제품에 치명적인 손상을 야기할 수 있습니다.
- 6) 제품을 할 혹은 가위 등 날카로운 물건으로 긁거나 훼손하지 마십시오.
- 7) 직실사를 방지하기 위해 포장재, 파우치, 비닐봉지 등을 아이가 만질 수 없는 곳에 보관 하십시오.
- 8) 제품 내부에 윤활유 및 세정제 등 이물질들을 도포하지 마십시오. 고창과 오염의 원인이 될 수 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

- 1) 안전한 세척을 위해서 휠스터 미니에 진입할 때 휠체어의 앞 쪽으로 진입한 후 사용해 주십시오. 뒤쪽으로 진입하여 사용하게 되는 경우 제품을 가로질러 떨어지게 되는 위험이 있습니다.
- 2) 세척하시는 휠체어의 타이어 공기압이 낮거나(60psi 이하) 타이어가 많이 마모되어 있는 경우 롤러에 무리한 부담이 가해져서 세척시 과도한 힘이 들거나 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 3) 사용법을 충분히 숙지하고 사용하여 주시기 바랍니다. 제품을 가로질러 진입하여 사용하거나 구동바퀴 회전을 한 쪽으로 힘을 과도하게 주면 세척시 제품 이탈의 위험이 있습니다.
- 4) 반드시 경사 혹은 굴곡이 없는 평지에서 사용하여 주십시오. 경사진 곳에서 사용하게 되면 추락의 위험이 있습니다.
- 5) **제품 위에서 바퀴를 빠른 속도로 굴릴 시 타이어나 제품의 마모 및 파손이 발생할 수 있습니다. 반드시 천천히 굴리며 세척하여 주십시오.**
- 6) 미끄러운 바닥에서 사용하지 마십시오.
- 7) 휠체어가 비나 습기에 젖어 있는 상태에서 사용하게 되면 충분한 세척 효율이 나오지 않을 수 있습니다. 가급적 건조 상태의 휠체어를 세척하여 주시기 바랍니다. 또한 습기에 노출된 상태의 휠체어를 세척시 오염이나 부식의 위험이 있습니다.
- 8) 미니 스틱은 부드러운 솔이나 물티슈 등으로 표면의 먼지 및 이물질들을 부드럽게 제거하여 주십시오.
- 9) 휠스터 미니로 진입 시 세척하시는 휠체어 바퀴의 중앙과 제품 경사로의 중앙을 맞추어 진입하십시오. 대각선으로 진입하게 되면 휠체어 구동바퀴 회전 시 한쪽으로 쏠림현상이 나타날 수 있으며, 과도한 쏠림이 발생하게 되는 경우 이탈 및 파손의 위험이 있습니다.

유지보수를 위한 주의사항

- 1) 제품을 장기간 세척하지 않고 사용하게 되는 경우 롤러 베어링과 같은 구동부에 이물질이 삽입되어 제품의 성능에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다. 제품의 성능을 최선으로 유지하기 위해서 주기적으로 휠스터 미니 본체에서 브러쉬 패드를 분리하여 세척하시기 바랍니다.
- 2) 산성이나 알칼리성이 강한 화학 물질을 사용하여 제품을 세척하지 마십시오.
- 3) 휠스터 미니 본체 세척시 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 4) 휠스터 미니 본체는 물에 넣어 세척하지 마십시오. 물에 세척하게 되는 경우 롤러 베어링의 부식이 발생할 수 있습니다.
- 5) 휠스터 미니 본체는 브러쉬 패드를 분리한 후 부드러운 솔이나 물티슈 등으로 내부의 먼지 및 이물질을 제거하여 주십시오.
- 6) 브러쉬 패드는 휠스터 미니 본체에서 분리 후 흐르는 물에 부드럽게 세척하십시오.
- 7) 브러쉬 패드 세척 시 무리한 힘을 가하지 마십시오. 모의 변형이나 모 빠짐의 원인이 될 수 있습니다.
- 8) 미니 스틱은 부드러운 솔이나 물티슈 등으로 표면의 먼지 및 이물질을 부드럽게 제거하여 주십시오.
- 9) 미니 스틱 세척시 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 10) 제품 각 부를 세척한 후 물기를 완전히 건조하여 사용하십시오. 물기로 인해 제품에 오염이 묻어날 수 있습니다.
- 11) 뚜껑을 열 때 PUSH 표시된 반대쪽 부분을 누를 경우 안쪽으로 들어가 뚜껑을 열기 힘들 수 있습니다.

품질보증정책

소비자 피해 유형	보상내역		
	보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)			
수리 불가능 시			
소비자의 고의, 과실 및 천재지변에 의한 고장 발생 시	소비자가 수리를 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	유상수리
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 전달 중 발생된 피해	제품교환	유상수리
소비자의 고의, 과실 및 천재지변에 의한 고장 발생 시	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리비용 징수 후 제품 교환	유상수리비용 징수 후 제품 교환

품질보증서

본 제품의 품질보증기간은 1년 입니다.

캠스터즈(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래 위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다. 서비스 발생 시 캠스터즈(주)에서 서비스를 진행합니다. 단, 고장 과실 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우는 보증 대상에서 제외되어 유상 처리 됨을 알려드립니다. 또한 본 제품의 핵심 부품의 보증 기간은 2년 입니다.

제 품 명	모 델 명
고객 명	S/N, LOT
구 입 일	구 입 처

☎ 031-506-0625

📺 카카오톡 채널 '캠스터즈'

영업시간 : 월요일~금요일 오전 10시~오후5시(토요일, 일요일 및 공휴일 휴무)




캠스터즈 주식회사
경기도 안산시 단원구 광덕4로 108, 408호
info@kang-sters.com
www.kangsters-crew.com

Kangsters

WHEELSTER MINI

Quick Start Guide

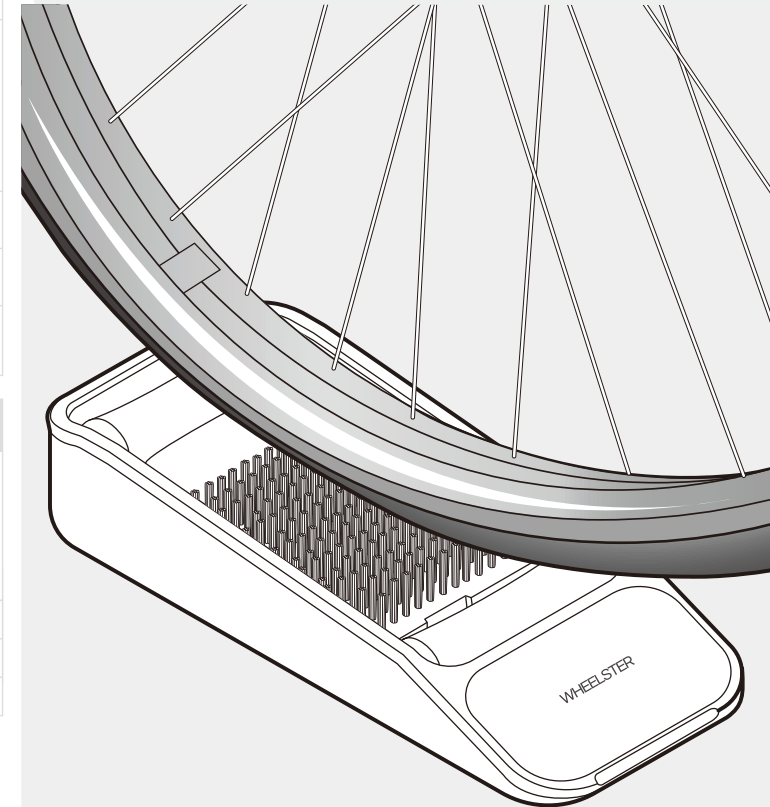

MODEL

WM211PG | WM211PW

※ 본 가이드는 휠스터 미니의 안전한 사용과 사용자 및 주변 사람의 위해와 재산의 손해 등을 막기 위한 안내문 입니다.
※ 주의사항을 지키지 않아 발생한 사고에 대해서 판매 및 제조 회사는 책임을 지지않습니다. 이용하시기 전 반드시 주의사항과 사용방법을 숙지하십시오.

— 구성품 및 제원 —

● WM211PG ● WM211PW

① 커버
② 미니 본체
③ 경사로
④ 앞 롤러
⑤ 뒷 롤러
⑥ 브러쉬 패드
⑦ 스틱 상부
⑧ 스틱 하부
⑨ 손잡이
⑩ 연장봉

휠스타트 미니 미니스틱

교체용 브러쉬 패드 전용 파우치

퀵스타트 가이드

— 세척준비 —

※ 물티슈 사용시 꼭 2번 접어서 사용해 주세요.

미니 본체 아래에 **PUSH** 표시된 쪽을 네 손가락으로 이용해 반대쪽으로 밀듯이 꼭 눌러주세요.

커버를 열고, 스틱으로 미니 본체를 **뒷 바퀴 앞**에 위치시켜 주세요.

— 뒷 바퀴 세척 —

경사로 정 중앙에 직선 방향으로 올라간 뒤, 반대편 브레이크를 채워주세요.

미니스틱의 세척면을 뒷바퀴에 밀착시켜 주세요.

뒷바퀴를 천천히 앞으로 굴리며 세척해 주세요.

— 앞 바퀴 세척 —

세척하려는 앞 바퀴 쪽 브레이크를 걸어주세요. 미니스틱을 앞 바퀴에 밀착시켜 주세요.

반대 쪽 뒷바퀴를 뒤로 굴리며 세척해주세요.

— 제품 세척 방법 —

미니 본체 브러쉬 패드

미니 본체 세척 방법 : 미니 본체에서 브러쉬 패드를 분리한 뒤, 먼지를 털거나 티슈 등을 활용해 세척해 주세요.

브러쉬 패드 세척 방법 : 분리한 브러쉬 패드를 물세척 후 완전히 건조해 주세요.